

販売元： ロート製薬（株） 製造販売元：ロート製薬（株）	ドゥーテストLH排卵日予測検査薬 スティックタイプ	排卵日予測検査薬
---------------------------------	------------------------------	----------

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための 説 明 文 書



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	ドゥーテストLH排卵日予測検査薬 スティックタイプ
2	成分・分量	（テストスティック1本中） 金コロイド標識抗黄体形成ホルモン・モノクローナル抗体（マウス） 抗黄体形成ホルモン・モノクローナル抗体（マウス） 抗マウス IgG・ポリクローナル抗体（ウサギ）
3	使用目的	尿中の黄体形成ホルモン（LH）の検出（排卵日予測の補助）
4	使用方法	<p>【検査のタイミング】 ご自分の生理（月経）周期から換算して、次の生理（月経）開始予定日の17日前から検査を開始してください。</p> <p>【検査の仕方】 検査開始日から、1日1回、毎日ほぼ同じ時間帯に検査をしてください。 （過去に検査してLHサージがうまく確認できなかった場合や、今回検査をしたところ陽性が陰性かの判定に迷う場合などには、1日2回検査を行うことで、よりLHサージをとらえやすくなります。）</p> <p>・ 検査の手順及び判定の仕方 テストスティックに尿をかけて、基準ラインの線の濃さを比較してください。 検査方法の詳細は商品に同梱されている「添付文書」並びに「ご使用の手引き」に記載してありますので、必ずご確認の上、ご使用ください。</p>
5	保健衛生上の危害を防止するために	<p>1. 次の人は使用しないでください。 ・ 避妊目的で使う人 本品は、避妊目的に設計されておらず、検査結果が陰性であっても確実に避妊できるものではないので、避妊の目的で用いてはいけません。</p> <p>2. 次の人は、使用前に医師に相談してください。 ・ 不妊治療を受けている人。 ・ 通常の性交を継続的に行っても1年以上妊娠しない人。 ・ 生理（月経）周期が極端に不順又は経血量が異常など月経異常がある人。</p> <p>3. 上記1. 2. に該当しない場合、使用可能になります。 （1. 2. に該当した場合は、医師にご相談の上ご使用ください。）</p> <p>以下の点に注意した上で、ご使用ください。 ・ 適正使用をする為に商品に同梱されているチェックシートをご確認の上、ご使用ください。 ・ 検査期間中、陰性が続きLHサージが確認できない場合は、早期に医師又は薬剤師にご相談ください。</p>
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。